

PANEL DE CONTROL PARA GASES MEDICINALES**ESPECIFICACIONES**

El panel de control de gas pertenece a la serie Ohio Medical Healthcair®. El panel de control está tratado para su uso seguro con oxígeno y cumple la norma NFPA 99.

La caja del panel de control se fabrica de acero calibre 14 pintado y la parte delantera es de aluminio para facilitar la limpieza. Cuenta con tubos de cobre tipo "K" de 13 mm (1/2 pulg) de diámetro interno para las conexiones de entrada y salida.

La caja está equipada con soportes ajustables para que se adapte a diversos grosores de pared, cuando instalado en paredes o paneles de yeso o similares. El panel frontal del conjunto cuenta con bisagras en la caja para facilitar el mantenimiento y la instalación. Los conectores flexibles de alta presión se conectan desde los tubos de conexión de entrada y salida en la caja a los componentes en el panel frontal.

El gas entrante se encamina primero por un tubo de 12.7 mm (5/8 pulg) de diámetro exterior hasta una válvula de cierre de cuarto de giro clasificada para 2068 kPa (300 psig). Un indicador de 0 a 2068 kPa (0 a 300 psig) muestra la presión entrante. El regulador de presión de 0 a 2068 kPa (0 a 300 psig) incorpora una función de "ajuste y bloqueo", y un indicador de 0 a 2068 kPa (0 a 300 psig) muestra la presión regulada.



La presión de entrada máxima es de 2068 kPa (300 psig), que se puede regular a 1724 kPa (250 psig). El panel cuenta con una salida tipo DISS y adicionalmente cuenta con un tubo de conexión de salida de cobre tipo "K" de 13 mm (1/2 pulg) de diámetro interior para alimentar alguna otra salida de gas en la habitación, si estas existen.

El panel frontal incluye una salida DISS (Sistema de seguridad de índice de diámetro) para nitrógeno, aire, CO2 o un adaptador de aire Schrader.

El equipo se fabrica en EE.UU. y se produce en una instalación registrada en conformidad con la norma ISO 13485.



PANEL DE CONTROL DE GAS

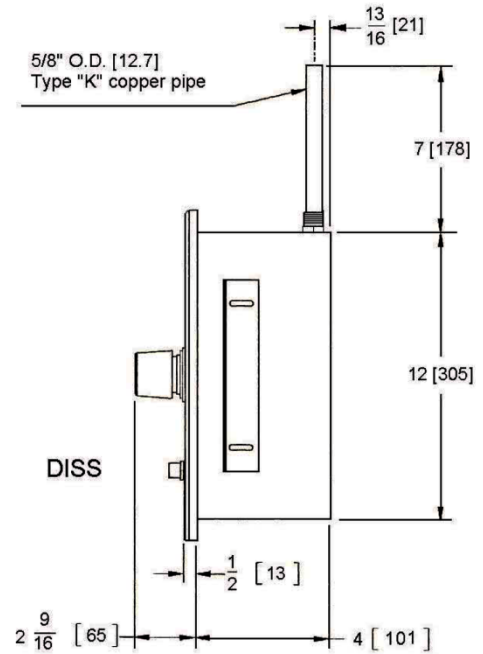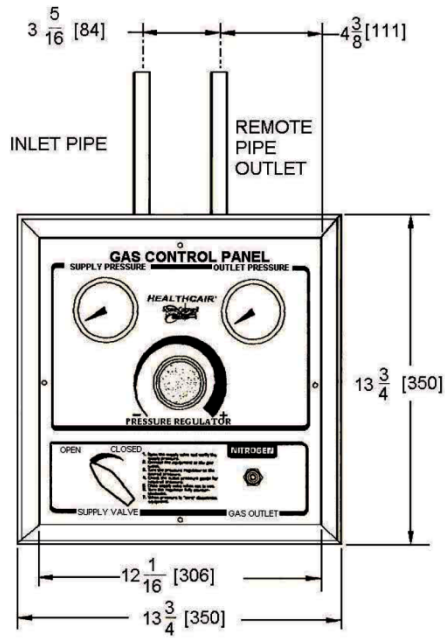

Dimensions in inches [mm]

NÚMEROS DE PIEZA

- | | | |
|--------------------------|-----------|---|
| <input type="checkbox"/> | 261760 | Panel de control de nitrógeno |
| <input type="checkbox"/> | 261911 | Panel de control de Aire de instrumentos |
| <input type="checkbox"/> | 263280 | Panel de control de CO2 |
| <input type="checkbox"/> | 261911-SH | Panel de control de aire con adaptador Schrader (no se muestra) |

